



ISO 9002



0473

Свойства

Porcelain Fix™ - набор материалов для подготовки к приклеиванию фарфоровых дентальных изделий (вставок, коронок и пр.).

Porcelain Fix™ состоит из **Porcelain Etch™** и **Porcelain Silane™**.

Porcelain Etch™ - специальная кислота для травления фарфора. Придает микроскопическую пористость поверхности, обеспечивает прочное механическое сцепление с композитами и адгезивами.

Porcelain Silane™ - отдельный компонент Silane, усиливает сцепление и надежность адгезии к протравленному фарфору.

Применение

Комплект **Porcelain Fix™** используют при необходимости улучшить адгезию к фарфору.

Porcelain Fix™ применяется для:

- ♦ подготовки фарфоровых дентальных изделий (вставок, коронок, зубов и пр.) к установке.
- ♦ подготовки поломанных керамических или металло-керамических коронок к склеиванию.

Срок хранения

2 года при температуре ниже 20°C (68°F).

Предостережение

Будьте осторожны и осмотрительны при применении **Porcelain Etch™**. Остерегайтесь контакта со слизистой оболочкой рта, кожей и глазами. При случайном контакте, обильно смойте водой и, в случае необходимости, окажите необходимую медицинскую помощь.

В случае применения **Porcelain Etch™** во рту пациента, рекомендуется изолировать обрабатываемую поверхность.

Основные компоненты

Porcelain Etch™:

Плавиковая кислота	8%
Вода	90.5%
Загуститель	1.5%

Porcelain Silane™:

Этиловый спирт	97%
Глюцидоксипропил триметоксисилан	3%

Подготовка керамической поверхности к приклейке

Инструкция по применению

1. В случае использования во рту пациента, изолируйте протравливаемую поверхность.
2. Подготовка отдельной керамической коронки:
Перед травлением, бором средней твердости удалите стекловидное покрытие с приклеиваемой поверхности что-бы нанести достаточный для прочности и эластичности слой адгезива или композита. Смойте остатки с керамической поверхности и высушите влагу воздухом.
3. Микрокисточкой нанесите **Porcelain Etch™** на поверхность керамики и оставьте на 60 секунд.
4. Тщательно прополощите водой керамику для удаления кислоты и высушите. Протравленная керамика должна иметь белый "замороженный" узор. Если нет - повторите процедуру травления.
5. Нанесите кисточкой **Porcelain Silane™** на протравленную поверхность и тщательно высушите потоком воздуха.

Примечание: процедуры приклейки керамики указаны в иллюстрированных инструкциях для **High-Q-Bond Adhesive Reisin Cement™**.